

Instrucciones para la recogida de muestras con escobilla Copan - Gatos

Sólo es necesario el uso de una única escobilla por cada animal.

COMBIGEN no le cobra por estas escobillas, las cuales tienen un precio de 2,5€ cada una. Por ello le agradeceríamos que, si finalmente no las utiliza, nos las remita de vuelta por correo postal, lo cual contribuirá a que sigamos ofreciendo el material para recogida de muestras, de manera gratuita.

**LABORATORIOS LABOCOR S.L.
C/ Alamillo, 41
28770 Colmenar Viejo (MADRID)**

Por favor siga las instrucciones de abajo junto con las instrucciones de dentro del paquete de la escobilla.

- Recomendamos, si es posible, enjuagar la boca del animal con agua. Para obtener mejores resultados, no permitir al animal comer 30 minutos antes de la recogida de la muestra.
- Abrir la bolsa de recogida de muestra con cuidado.
- Sacar la escobilla de la bolsa. Cepillar con la escobilla unas 2 veces dentro de las mejillas del animal.
- Desenroscar y quitar el tapón del tubo.
Poner especial cuidado en no tocar el contenido líquido del tubo con su piel. En caso de que ocurra accidentalmente, enjuagar exhaustivamente la superficie de la piel con agua.
- Introducir la escobilla húmeda en el tubo.
- Romper la escobilla por la zona dispuesta para ello. Reemplazar el tapón en el tubo y cerrar totalmente el tubo.
- Usar una escobilla Copan por animal.
- Asegurarse de identificar claramente el animal en la etiqueta del tubo. Para una recepción correcta, debe estar claro qué escobilla procede de qué animal.
- Por favor remita las muestras a la dirección facilitada en nuestro Formulario de envío de muestras.



Todas las muestras deben ir acompañadas con el Formulario de envío de muestras.